

## Protector Barrera facial

### Especificaciones Técnicas:

- ✓ Material: PET 0.5mm Transparente.
- ✓ Material de estructura: Plástico.
- ✓ Diseño ergonómico.
- ✓ Reutilizable.
- ✓ Comodidad para uso con lentes de visión o protección ocular.
- ✓ **AJUSTE FACIAL:** Banda elástica fijada a la máscara
- ✓ **PROTECCION:** Rostro completo.



### Limpieza y desinfección

Limpie y desinfecte con agua jabonosa o solución de limpieza para lentes.  
Enjuagar y secar con paño limpio y suave o tisú.  
No limpiar o usar con solventes.

### Mantenimiento

La vida útil depende del tipo de uso, cuidado y mantenimiento. Si el marco o el visor están dañados se debe reemplazar, porque reduce el nivel de protección y de visión.

## ARMADO DE LA MÁSCARA

